

高英高級工商職業學校美容科

全能緊緻儀 操作流程

操作步驟：

1. 插上插頭後開啟電源。
2. 依照顧客需求選擇程式、強度、時間。
3. 開啟 ON/OFF 啟動機器。
4. 按” Function Select” 選擇 Warm Roller” 。
5. 按” SELECT” 調整模式及溫熱。
6. 按 START/STOP” 開始操作。
7. 操作完成即關閉。

注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 請勿一次操作超過 30 分鐘。
3. 過度鬆弛的肌膚不建議使用。
4. 患有心臟病、癌症、肝腎疾病、靜脈曲張及懷孕婦女，不建議使用。
5. 極度敏感肌膚不建議使用。