

高英高級工商職業學校美容科

多功能單機 操作流程

操作步驟：

1. 插上插頭後開啟電源。
2. 依照顧客需求選擇 EMS 電流種類。
3. 依顧客需求選擇服務方式。
4. 按” Suction” 調整負壓吸引時間。
5. 選擇單一部位進行療程，效果最佳。
6. 療程完成後清潔儀器。
7. 關閉電源、拔除插頭，放置乾燥處。

注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 患有特殊疾病者，不建議使用。
3. 嚴重血管擴張不建議使用。
4. 請勿一次操作超過 30 分鐘。
5. 使用前請在確認電壓是否正確。