

高英高級工商職業學校美容科

熱能活妍緊緻儀 操作流程

操作步驟：

1. 插上插頭後開啟電源。
2. 依照顧客需求選擇服務方式。
3. 依照顧客需求調整時間長度及強度調整。
4. 按” Frequency” 調整間斷頻率深. 中. 淺。
5. 順著肌肉紋理使用儀器進行按摩。
6. 療程完成後清潔儀器。
7. 關閉電源及拔除插頭。

注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 請勿一次操作超過 30 分鐘。
3. 嚴重含膿的暗瘡不建議使用。
4. 損傷、割傷或新生成的疤痕。
5. 極度敏感肌膚不建議使用。