

高英高級工商職業學校美容科

頭皮養護機 操作流程

操作步驟：

1. 插上插頭後開啟電源。
2. 依照顧客需求選擇電流種類。
3. 按” Time” 調整時間長度。
4. 按” Level” 調整電流強度 1-9。
5. 選擇單一部位進行療程，效果最佳。
6. 療程完成後清潔儀器。
7. 關閉電源及拔除插頭。

注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 請勿一次操作超過 30 分鐘。
3. 注意不要摔落機器。
4. 使用前請再確認電壓是否正確。
5. 極度敏感肌膚不建議使用。