

# 高英高級工商職業學校美容科

## 優妮克魔法術 操作流程

### 操作步驟：

1. 插上插頭後開啟電源。
2. 依照顧客需求選擇程式、強度、時間。
3. 依照顧客需求選擇使用剪雕手或多極電波把手。
4. 可搭配使用精華液或按摩霜。
5. 順著肌肉紋理進行修飾雕塑。
6. 療程完成後清潔儀器。
7. 關閉電源及拔除插頭。

### 注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 請勿一次操作超過 30 分鐘。
3. 經期中不建議使用。
4. 患有心臟病、癌症、肝腎疾病、靜脈曲張及懷孕婦女，不建議使用。
5. 割傷或新生成的疤痕、過度鬆弛的肌膚、暗瘡及血管擴張者不建議使用。